



Oxivir Excel® Wipe CE

CE
0088

Lingettes détergentes et désinfectantes à large spectre pour le matériel médical non invasif et les surfaces non poreuses

Description

Les lingettes Oxivir Excel Wipe CE nettoient et désinfectent en une seule étape. Elles ont un large spectre avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accéléré. Les lingettes Oxivir Excel Wipe s'utilisent sur le matériel médical non invasif et les surfaces dures, non poreuses.

Propriétés

- Bactéricide, Virucide, Levuricide
- Désinfecte en 1 minute*
- Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces
- Pratique avec un système prêt à l'emploi
- Sans parfum
- Les actifs se décomposent en eau et en oxygène
- Sans rinçage

Bénéfices

- Son efficacité à large spectre apporte les plus hauts niveaux de protection aux patients/ résidents. Testé selon les normes européennes de désinfection contre de multiples pathogènes, avec une revendication virucide complète Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus, efficace contre tous les virus enveloppés comme : HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus et Coronavirus.
- Un temps de contact court qui garantit l'efficacité désinfectante
- Excellent pouvoir détergent
- Sécurité d'utilisation pour les utilisateurs, les patients et visiteurs, non irritant pour les yeux et la peau
- Formulation AHP douce pour les surfaces pour étendre leur durée de vie
- Simple et facile à utiliser éliminant tout risque d'erreur de dosage/dilution
- Pas de risque de contamination croisée et un gain de temps non négligeable grâce aux lingettes jetables
- Convient à l'utilisation dans les zones à hauts risques infectieux

Mode d'emploi


Application

1. Retirer les grosses salissures.
2. Ouvrir le paquet de lingettes, prendre une seule lingette et le refermer
3. Appliquer sur la surface, s'assurer que toute la surface est humidifiée, laisser sécher
4. Changer la lingette quand elle n'humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou en cas de changement de la surface à nettoyer

Important: Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou aux acides.

* S'assurer que la surface reste humide pendant toute la durée de contact

ACCELERATED[®]
HYDROGEN PEROXIDE

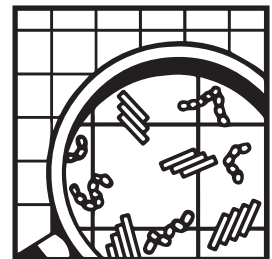



Oxivir Excel® Wipe



Données techniques

Aspect :	lingettes polypropylène
Densité relative (20°C) :	1.000
pH pur (20°C) :	1.95

Les données ci-dessus sont représentatives d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Précautions de manipulation et de stockage

Les recommandations complètes pour la manipulation et l'élimination du produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité. Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Réagit avec les substances oxydables.

Compatibilité du produit

Selon les recommandations d'utilisation, Diversey Oxivir Excel Wipe CE convient à tous les matériaux traditionnellement rencontrés à l'exception notable des alliages de cuivre et de zinc - se référer à notre table de compatibilité pour plus de précision.

Informations environnementales

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE 648/2004.

Données microbiologiques

Efficacité prouvée conformément aux normes: EN13727, EN13624, EN14476.

Revendication		Temps de contact
Bactéricide	Prêt à l'emploi	5 min
Levuricide	Prêt à l'emploi	5 min
Virucide	Prêt à l'emploi	30 sec

Pour des tests complémentaires, se référer au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.